



主な仕様

|             |                                 |                       |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|
| 販売名         | 全自動血圧計 UDEX-i2                  |                       |
| 仕様          | Type-I(標準)                      | Type-II(プリンター付き)      |
| 機能          | 音声・通信付                          | プリンタ・音声・通信付           |
| 電源定格・消費電力   | AC100V 50/60Hz 40VA             |                       |
| 電撃防護型式      | クラスⅡ B型                         |                       |
| 測定方法        | リバロッチ法+オシロメトリック法                |                       |
| 測定範囲        | 圧力 10～250mmHg、脈拍数 30～200拍/分     |                       |
| 計量範囲/目量     | 10～300mmHg / 1mmHg              |                       |
| 表示方法        | LEDデジタル方式                       |                       |
| オートペーパーカッター | 無し                              | フルカット方式/パーシャルカット方式    |
| プリンター       | 無し                              | ラインサーマルプリンター          |
| 音声機能        | ADPCM音声合成方式                     |                       |
| 通信機能        | RS-232C準拠                       |                       |
| カウンター機能     | 0～999999回                       |                       |
| 外形寸法        | アームレスト装着時                       | W242mm×D534mm×H338mm  |
|             | 架台取付時                           | W400mm×D537mm×H1020mm |
| 質量          | 約4.5kg                          | 約5.0kg                |
| 法定耐用年数      | 6年                              |                       |
| 耐用期間        | 7年(25万回相当:自己認証基準による)            |                       |
| 保証期間        | 1年間                             |                       |
| 医療機器の種別     | 管理医療機器(クラスⅡ)特定保守管理医療機器          |                       |
| 一般的名称       | 医用電子血圧計(JMDNコード16173010)        |                       |
| 認証番号        | 221AIBZX00065000                |                       |
| 型式承認番号      | 第Q1931号                         |                       |
| 付属品         | 記録紙MR-58L 1巻(Type-IIのみ)、取扱説明書   |                       |
|             | 3P電源ケーブル(2m)、腕帯布2枚(内1枚は出荷時に取付済) |                       |

本体寸法

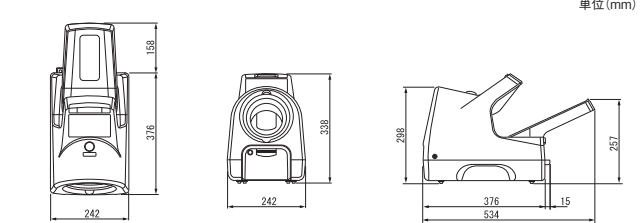

専用架台設置時寸法

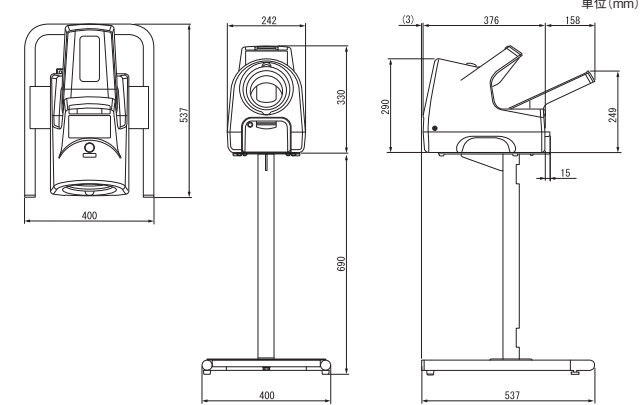

○写真はカタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。また、外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

●ご注文・お問い合わせは下記へどうぞ

オプション

|                                 |
|---------------------------------|
| 血圧計専用架台(組立式) US-1K              |
| 血圧計用椅子 エアー式 SNC-T134BKN-ADJST   |
| 腕帯布 UDEX-i2用ネイビー(2枚入り)          |
| 記録紙 MR-58L 58MMX63M (1箱6巻入)     |
| キャリングケース PD-AR                  |
| 全自動血圧計用Bluetoothユニット(ラトックシステム製) |
| 全自動血圧計用Bluetoothユニット接続ケーブル      |
| 全自動血圧計用二又分配ケーブル                 |
| 全自動血圧計用フットスイッチ                  |



■専用架台と椅子の使用例  
・椅子は高さを調整できます。正確に血圧を測定するには、測定部位を心臓の高さに合わせます。  
・椅子には固定脚が同梱されています。床が滑りやすい場合などは固定脚に付け替えてご使用下さい。



フットスイッチ



Bluetoothユニット  
(ラトックシステム製)



記録紙 MR-58L  
58MMX63M  
(1箱6巻入)

血圧QRアプリのダウンロードはこちらから。



App Storeは、Apple Inc.の  
サービスマークです。



Google Play および  
Google Play ロゴは  
Google LLC の商標です。



血圧測定時の注意

- 測定前は5分くらい安静にし、呼吸を整えてから測定して下さい。
- 測定中は体を動かしたり、しゃべったりしないで下さい。
- 上着やセーターは脱いで、裸腕か薄手のシャツで測定して下さい。
- 薄手の衣類の場合は、袖をまくらず測定して下さい。
- 腕帯と心臓の高さが違うと正しく測定できません。椅子の高さを調整して腕帯と心臓の高さを同じにして下さい。
- 腕が充分に奥まで入っていないと正しく測定できません。腕は肩口まで充分奥に入れて下さい。
- 腕回りが17cm以下の方、及び小学生以下の子供は測定できません。
- 測定中、いたいと感じたり、気分が悪くなった時は、慌てずに「非常停止ボタン」を押して下さい。腕帯内の空気が速やかに抜け、腕を抜くことができます。

■血圧計の修理はフリーダイヤルにご連絡下さい。

UDEX修理専用ダイヤル  
受付 弊社営業日の9:00～17:30

☎ 0120-66-4491

全自動血圧計

全自動血圧計

# UDEX-i2

Type-I(標準) Type-II(プリンター付き)

## 健診や診察室・待合室での血圧測定 職場やスポーツジムでの健康管理に

- コンパクトボディに見やすい表示部と大きなスタートボタンを配置
- 微加圧制御機能で測定者の血圧に応じてソフトに加圧
- 左右どちらの腕でも測定可能、車いすのままでも測定できるバリアフリー設計



毎日変動する血圧を  
スマホで管理



血圧QR

Canon

キヤノンメドテックサプライ株式会社

<https://mts.medical.canon>

本 社 〒211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町9番1号

GAC2025022801



日常的な血圧チェックが、健康管理の第一歩です。

日本に約4,300万人いるといわれる高血圧の方のうち、治療を受け、血圧を良好にコントロールできているのは約1,200万人、一方、自身の高血圧を認識しておらず、未治療の方は約1,400万人いると推測されています\*。

高血圧はかなりの期間、自覚症状がありません。

そのため、気づかないまま、長く高血圧の状態が続くと、心臓や脳、腎臓に障害をきたし、最終的には心筋梗塞や脳卒中を起こします。このサイレントキラーと呼ばれる高血圧を早期に発見し、いち早く治療を開始するため、また、治療中の方にも、日常的な血圧の確認は必要不可欠です。

診療における患者様の血圧測定や、企業における社員の健康維持に全自動血圧計UDEX-i2をお役立てください。

\*日本高血圧学会作成、高血圧治療ガイドライン2019 JSH2019より引用、一部改変



あらゆるシーンにおける日々の血圧チェックの推進に

健康診断での血圧測定やクリニックの待合室を活用した患者サービスだけでなく、社員の健康管理やスポーツジム、ドラッグストア、調剤薬局、介護施設等の顧客サービス向上に、物流業界での健康起因事故防止対策として点呼時に、タクシーやバスなど人の命を預かるプロドライバーの乗務前に。設置場所を選ばず、置くだけで誰もが気軽に血圧を測定できます。



■クリニック



■介護施設



■オフィス



■スポーツジム



■ドラッグストア



■営業所

■本体の設置手順および血圧の測定方法は以下のリンクから動画でご覧いただけます。



血圧計の設置手順  
(6分50秒)



血圧の測定方法  
(2分50秒)

リバロッチ法とオシロメトリック法を組み合わせたハイブリッド測定

診察室の血圧測定法であるリバロッチ法※を基本にオシロメトリック法を組み合わせた測定方式を採用しています。コトコフ音を感知しながら加圧量を制御することで腕への締め付けを低減。また、内蔵の振動検出センサにより信頼性と安全性を高めています。(血圧が高い方はそれに応じた加圧を行います)

※日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2019より

■高感度マイクロフォン

脈音を検知しながら一人ひとりに合わせて加圧を調整するための、腕への圧迫が少なく、スピーディーに測定できます。


■快適・ドライ性素材

腕帯布は特殊断面ポリエステルと耐塩素性ポリウレタン繊維を組み合わせたトリノクール®を採用しています。吸水性、速乾性があり、しなやかで優しい肌触りです。



外部システムやアプリとの連携でさらに活用の幅が広がる

単体での使用はもちろん、外部システムやアプリとの連携を図ることで、測定データをより積極的に活用することが可能になります。

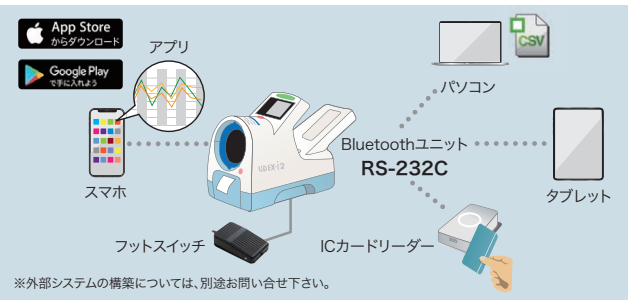

■Bluetoothで外部システムとつながる (オプション)

Bluetoothを通じてパソコンやタブレットとも接続でき、社員の健康を一元管理できます。さらに社員証やスポーツジムの会員証などICカードとの連携により、測定結果を自己管理することも可能です。

■フットスイッチでも測定できる (オプション)

フットスイッチにも対応し、健診会場で看護師さんが測定する際に便利です。


■アプリとの連携で自己管理が簡単

(別途、血圧QRアプリのダウンロードが必要です)

各種健康管理アプリと連携。日々の血圧測定結果をスマホで自己管理し、推移を簡単に管理できます。血圧は日々変動します、継続して記録を付けることで行動変容にもつながりやすくなります。



(1週間の測定結果イメージ)

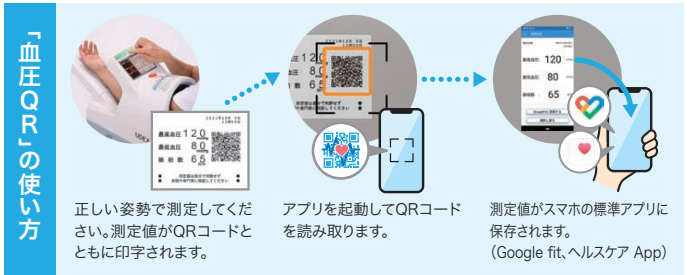

測定サポートと安心の非常停止機構

初めての方や高齢の方でも直感的に、より安全に使用できます。



■大きなスタートボタン

大きく押しやすいスタートボタンが緑色に点滅し、測定を促します。

■安心の非常停止ボタン

ひと目でわかる位置に赤い大きな非常停止ボタンを配置。万が一の際も、速やかに腕の締め付けを解除する安全設計です。

■わかりやすく測定手順をナビゲート

音声ガイドとともに、該当部分のイラストが点滅。測定手順を視覚的にナビゲートします。

左右どちらの腕でも測定することが可能

車椅子に乗ったままでも、一人で簡単に血圧を測定することができるバリアフリー設計を採用。左右どちらの腕でも測定しやすいデザインです。




自由かつ拡張性のある印字を実現しコストダウンにも貢献

大型ロール紙を採用することにより、記録紙を交換する手間を削減。また、記録紙のサイズを複数から選択できたり、測定結果に加えてQRコードやロゴを印字できたりと、拡張性にも優れています。

※専用記録紙MR-58Lは幅58mm×長さ63M/当社従来品は幅58mm×長さ25M

■標準サイズ(長さ約59mm)

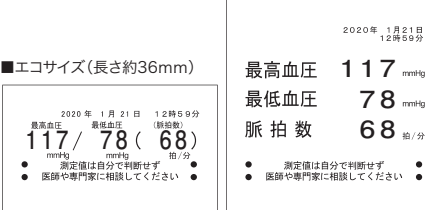

■エコサイズ(長さ約36mm)



■ビッグサイズ(長さ約104mm)



■選べる記録紙サイズ

用紙の使用を抑えられるエコサイズから、視認性が高く、高齢者にも適したビッグサイズまで記録紙のサイズを選択できます。

| 記録紙サイズ | 記録紙の長さ | 印字回数(目安) |
|--------|--------|----------|
| エコ     | 36mm   | 1,736回   |
|        | 56mm   | 1,116回   |
| 標準     | 59mm   | 1,059回   |
|        | 79mm   | 791回     |
| ビッグ    | 104mm  | 600回     |
|        | 124mm  | 504回     |

\*各印字モードの使用回数の目安 専用記録紙 MR-58L(63m) 使用時

■QRコード印字

各種健康管理アプリとの連携し、デジタル管理するために、記録紙にはQRコードを付与することができます。※QRコードの読み取りには血圧QRアプリのダウンロードが必要です。



■オリジナルロゴ印字

企業イメージ向上や測定場所の確認用として、記録紙にオリジナルのロゴを印字することも可能です。

