


# TOSI Test Object Surgical Instruments

## TOSI 洗淨評価インジケータ

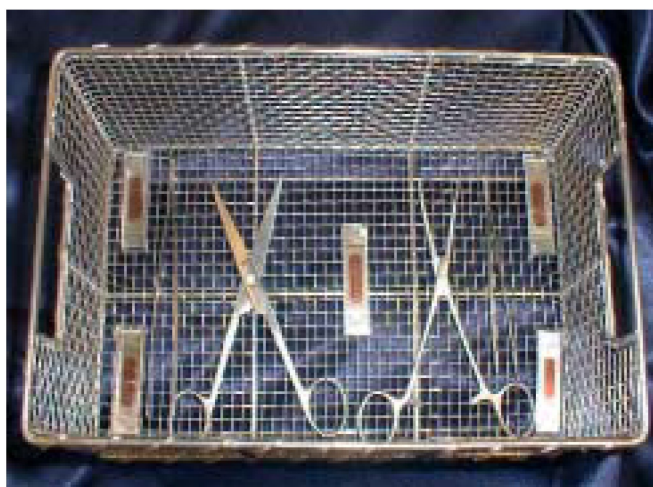

### 使用方法：

左図のように、バスケットに掛けて洗淨させます。  
工程のプログラムや洗剤注入量の見直し、そして  
毎回の工程で洗淨評価を行う時に、使用することを推奨致します。

### 仕様：

入り数 12個  
寸法 15cm×50mm  
透明カバー プラスチック製  
擬似血液 牛血精製物（アルブミン、ヘモグロビン、  
フィブリノーゲン、トロンビン）

### 保存方法：

室温で直射日光や湿気を避け、消毒剤と隔離し、消毒剤の蒸気が  
当たらないように保管して下さい。

**Canon**

キヤノンメドテックサプライ株式会社





<https://mts.medical.canon>

本社 〒211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町9番1号



# TOSI LumCheck

## 内腔洗浄評価インジケータ

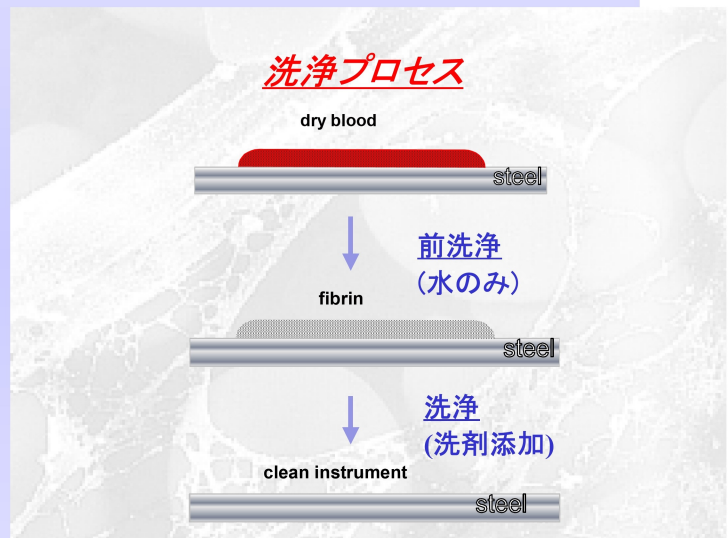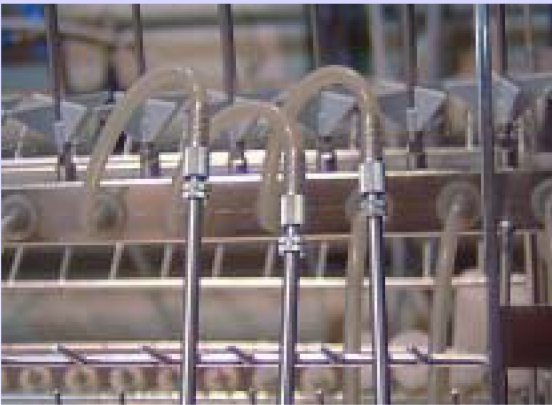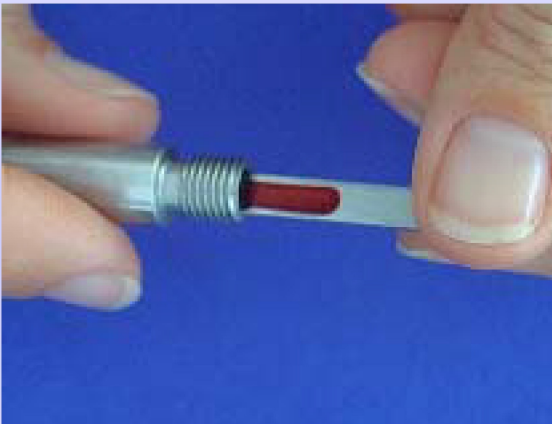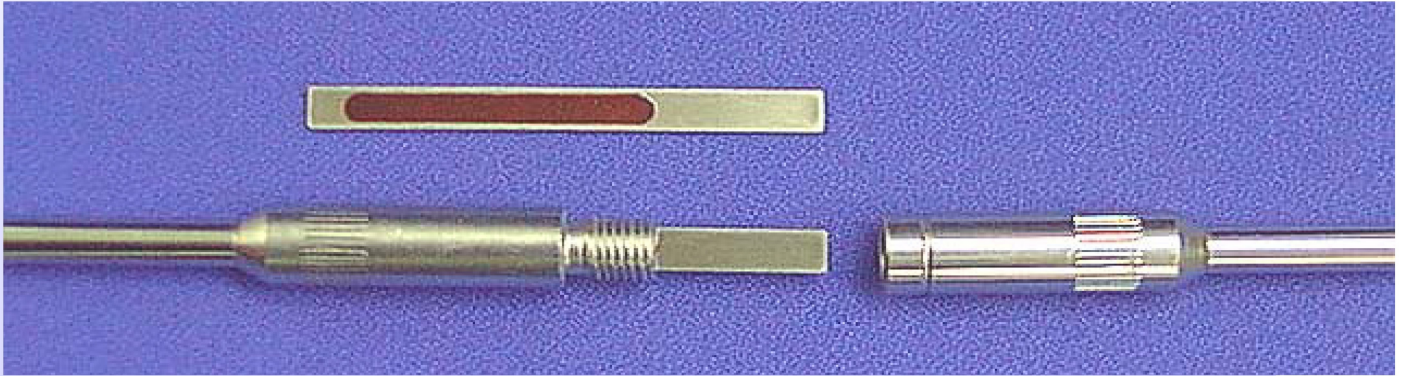

### 使用方法：

左図のように、TOSI LumCheck を LumCheck に入れ、ウォッシャーディスインフェクターで処理した後に、洗浄結果を評価します。

工程のプログラムや洗剤注入量の見直し、そして毎回の工程で洗浄評価を行う時に、使用することを推奨致します。

### 仕様：

LumCheck

入り数 1本  
寸法 10mm × 285mm  
材質 ステンレス

TOSI LumCheck

入り数 25個  
寸法 5mm × 55mm  
材質 ステンレス  
擬似血液 牛血精製物（アルブミン、ヘモグロビン、フィブリノーゲン、トロンビン）

**Canon**

キヤノンメドテックサプライ株式会社

<https://mts.medical.canon>

本社 〒211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町9番1号

## TOSI 評価レベル

レベル0



完全に洗浄され、汚れ部分も完全に分解、除去されている状態。

レベル1




ほとんど洗浄されているが、ごくわずかに残留物（フィブリン）が見てとれる状態

レベル2



ほぼ洗浄されているが、フィブリンは残っている状態

レベル3

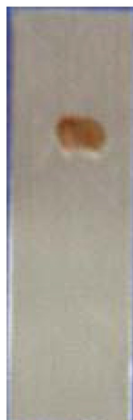

フィブリンは取れているが、タンパクが残っている状態

レベル4



フィブリン、及びタンパクが残っている状態

レベル5



タンパクが、全体に残っている状態

**Canon**

キヤノンメドテックサプライ株式会社

<https://mts.medical.canon>

本社 〒211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町9番1号

# TOSI 洗浄評価

- <レベル0> 完全に洗浄され、汚れ部分も完全に分解、除去されている状態。  
非常に良い機械の性能と洗剤の分解能力がある。
- <レベル1> ほとんど洗浄されているが、ごくわずか残留物（フィブリン）が見てとれる。  
洗浄機の洗浄効果（能力）は優れており、水に溶けるたんぱく質は完全に除去されている。  
洗剤、洗浄時間及び洗浄対象物の配置を見直すことで問題は解決できる。
- <レベル2> ほぼ洗浄されているが、フィブリンは残っている。  
水力による洗浄能力はあるが、洗剤による汚れの分解がされていない。  
洗剤の種類及び注入量の見直しが必要。
- <レベル3> フィブリンは取れているが、タンパクが残っている状態  
洗浄が不十分である。  
洗剤による汚れの分解能力は優れているが、洗浄能力は洗浄対象物の水力に欠ける。  
（主な原因）
- ・ 多くの器が重なりすぎて、全体的に水力が行き届かない
  - ・ 洗浄機のジェット水流の能力が弱い
  - ・ ポンプによるジェット水流が不十分
- <レベル4> フィブリン、及びタンパクが残っている状態  
洗浄が不十分であり、フィブリンが付着している。
- ・ 水力及び洗剤の分解能力が不十分
- <レベル5> タンパクが、全体に残っている状態  
全く洗浄されていない。汚れの表層部分も洗浄されていない。
- ・ ジェット噴射のシステムの問題や洗剤注入関連の問題  
または、洗剤の効力を発揮するための温度が適切ではない
  - ・ 前洗浄が高熱であるため、たんぱく質が凝固してしまう
  - ・ 洗浄対象物が重なりあって水力が届いていない

# TOSI Check

ウォッシャーディスインフェクター :

日付	プログラム	バッチ	サイン	結果レベル



キヤノンメディテックサプライ株式会社

<https://mts.medical.canon>

本 社 〒211-0067 神奈川県川崎市中原区今井上町9番1号